

# BRUKERVEILEDNING



**Hvordan dryppe med dråpestøtten?**

# Klargjøring



Fjern beskyttelseshetten på flasken ved å vri den av.



Plasser flasken i åpningen bak på dråpestøtten. Se til at flasken er dyttet helt inn.



Skru korken av ved hjelp av fingrene eller korkåpneren.

# Plassering og bruk



Len hodet bakover, dra det nedre øyelokket forsiktig ned med pekefingeren. Plasser øyekoppen over øyeområdet.



Se opp og trykk forsiktig på knappen slik at en dråpe kommer ut av flasken og inn i øyet.



Press lett i øyekroken (ca. 1 minutt) for å hindre at dråpen forsvinner ned tårekanalen. Skru korken på.

# Dråpestøtte



Når flasken er tom, skyves den ut av dråpestøtten og erstattes med en ny flaske.

Ved behov kan dråpestøtten vaskes med mild såpe og skylles godt i lunkent vann.

Dråpestøtten er tilgjengelig hos øyelegen, via apotek eller direkte fra Pfizer.

Pfizer AS  
Postboks 3  
1324 Lysaker  
Tlf 67526100  
Faks 67526192  
[www.pfizer.no](http://www.pfizer.no)



*Partner for bedre helse™*