

# Teknisk brukerveiledning

## Enbrel® MyClic®

25 og 50 mg ferdigfylt penn



### Forberede en injeksjon med MyClic\*



Vent i 15-30 minutter til oppløsningen har nådd romtemperatur.  
\* 25 og 50 mg ferdigfylte penner har forskjellig utseende, men bruksanvisningene er den samme for begge.

### Valg av injeksjonssted

- Anbefalt injeksjonssted er midt på låret foran. Se pakningsvedlegg for alternative injeksjonssteder.
- Hver injeksjon bør gis minst 3 cm fra det forrige injeksjonsstedet.
- Ikke injiser i øm, blåmerket eller hard hud. Unngå områder med arr eller strekkmerker.



Hvis du har spørsmål om hvordan man injiserer, kontakt lege eller sykepleier for hjelp.

## Instruksjonsvideo

- Gå inn på [www.pfizer.no/myclic](http://www.pfizer.no/myclic)

- Eller scan QR-koden




Les pakningsvedlegget som ligger i MyClic-pakningen før bruk

1

**Forberedelse:**

Vask injeksjonsstedet med en spritserviett.


Fjern den hvite kanyle-hetten ved å trekke den rett av.

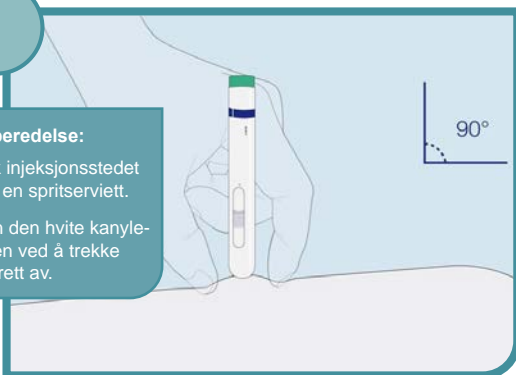

Hold pennen i rett vinkel på injeksjonsstedet og press bestemt ned den åpne enden av pennen ned mot huden inntil du ikke ser den lille kanylebeskyttelsen lenger.

2

**KLIKK**

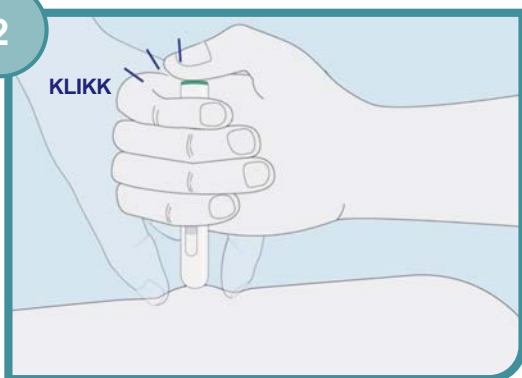

Injeksjonen kan gjøres uavhengig av når en trykker på knappen; man kan trykke ned knappen før eller etter at pennen trykkes ned mot huden. Du vil høre et klikk når injeksjonen starter.

3

**KLIKK**



Fortsett å holde pennen mot huden. Når du hører det andre klikket eller det har gått 10 sekunder er injeksjonen ferdig.

4

Inspeksjonsvinduet skal ha blitt lilla.

Lilla kanylebeskytter stikker ut og dekker kanylen.



Du kan nå fjerne pennen fra huden din.